

Lit verticalisateur S3 KN ORTHINEA

*Aide technique
au positionnement couché
ISO 18.12.10*

MOUVEMENTS FACILITÉS

Le dispositif s'adresse aux personnes souhaitant moduler leurs points de pression au cours de la nuit. Pour les utilisateurs ayant une force musculaire suffisante, le changement de position est facilité.

MATÉRIAUX

Châssis en acier, barrières et repose-pieds de verticalisation en bois et amovibles, télécommandes en plastique et 4 doubles-roulettes avec freins, font de ce lit une aide technique robuste.

COMPATIBILITÉ

Le lit verticalisateur Orthinea est compatible avec tous types de matelas anti-escarre à air ou à mousse.

Le lit verticalisateur d'Orthinea permet, en position couchée, de modifier les points de pression de l'utilisateur. Que ce soit par la verticalisation du sommier, l'usage des plicatures (possibilité de relever les jambes, la tête...), le réglage du lift (hauteur du lit), ou les appuis sur les barrières de sécurité, l'utilisateur voit son changement de position facilité.



Garantie : 2 ans

Dimensions :

Couchage : 60x120 cm, 90 x 200 cm,
100x200 cm, 140x240 cmHauteur verticalisé : 230 cm (peut être
réduite en option)

Poids du lit : 120 kg

Poids de l'utilisateur : de 135 à 280 kg

Énergie : 220 V

Matériaux :

Châssis : acier

Barrières : bois

Repose-pieds de verticalisation : bois

Télécommandes : plastique

Volume sonore du lit : les vérins Linak™

allient puissance et faible niveau sonore

Homologation du système : CE

Fabricant : Richter Freund &
Hacker GBR

Pays de fabrication : Allemagne

Fournisseur français :

Orthinea
102 route de Versailles
91160 Champlan
01 69 07 61 13
Info@orthinea.com

Tarif TTC : à partir de 8 990€

Remboursement de la Sécurité

Sociale : 382,19 - 588,76 €
Codes LPP : 1266846, 1238152,
1211489, 1207507

Location : non

Essais : possibles selon critères

Lien vers le produit

http://www.orthinea.com/Pages/Lits_verticalisateur.html

Lien vers les tarifs

<http://www.orthinea.com/Liens/RFH/FDM%20Lit%20V.pdf>

Rédaction :

Cellule Innovation AFM-Téléthon
▪ téléphone : 01 69 13 21 06
▪ celluleinnovation@afm-telethon.fr

Fonctionnement du lit verticalisateur Orthinea

Par un système de vérins, le lit atteint en quelques minutes, une **verticalisation de 85°**.

La hauteur du lit est réglable entre 40 et 80 cm.

Deux plicatures électriques permettent de surélever le buste et les genoux.



Le dispositif est doté de **3 télécommandes filaires** qui contrôlent les trois grandes fonctions du lit : les plicatures (buste et genoux) et la verticalisation.

En **option**, le lit se rend **compatible** avec tous les systèmes de contrôle d'environnement, contacteur et autres commandes infra-rouges.

Il n'est pas possible d'utiliser deux fonctions en même temps. Par exemple, les plicatures ne peuvent pas être actionnées lors de la verticalisation.

La programmation des cycles de positions n'est pas prévue.

Pour éviter les chutes, **3 sangles de maintien amovibles** sont proposées avec le dispositif.

Le modèle ne présente **ni système d'alarme** pour alerter en cas de dysfonctionnement éventuel, **ni système d'appel-malade**.

Différents modèles du lit verticalisateur Orthinea

- Le lit verticalisateur d'Orthinea est prévu pour être utilisé par des personnes pesant jusqu'à 185 kg.
- Une version **pédiatrique** (dimension minimum : 140 x 70 cm) ou **pour couple** est réalisable **sur-mesure**. La version pour couple est faite d'une seule pièce et le poids des utilisateurs ne doit pas dépasser la charge maximale (185 kg).
- Une version bariatrique existe pour les personnes pesant jusqu'à 280 kg.

Exemples d'**options** :

- taille du couchage, configuration et coloris : tout est personnalisable
- repose-pieds de verticalisation en acier laqué avec revêtement caoutchouc antidérapant
- repose-pieds réglable en inclinaison (positive et négative) pour talus ou équin fixé
- tiroir de rangement pour les sangles de verticalisation
- freins centralisés
- appui-tête (sangle frontale également disponible en option)
- tablette thérapeutique en bois ou plexiglas


AFM TÉLÉTHON
INNOVER POUR GUÉRIR

Association reconnue d'utilité publique

1, rue de l'Internationale - BP 59 - 91002 Évry cedex
Tél : 33 (0) 1 69 47 28 28 - Fax : 33 (0) 1 60 77 12 16
Siège social : AFM - Institut de Myologie
47 - 83, boulevard de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
www.afm-telethon.fr